

【体重計】かんたん連携



iPhone版

Android版

A&D体重計で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。


(対応機器：UC-352BLE)

- ◎ ◎ **連携を行う前に** ◎ ◎ ■ 「スマートフォン」：Bluetoothの設定はオンになっていますか
A&Dの体重計からデータを送信するために必要です。
設定方法はお使いの機種によって異なります。iPhoneの取扱説明書をご覧ください。


iPhone

【初回設定】ペアリング設定を行い、測定します。

- 1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、機器連携リストから [A&D体重計] をタップします。
- 2 [ペアリングモードにしてください] と表示されたら [はい] をタップし、体重計の裏面のボタンを長押ししてください。

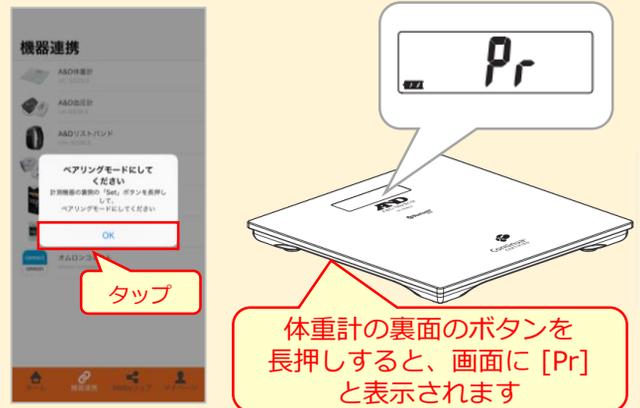

- 3 [計測機器とペアリング] が表示されたら、[ペアリングを開始] をタップします。
- 4 [Bluetoothペアリングの要求] が表示されたら、[ペアリング] をタップします。
[ペアリングが完了しました] が表示されたら、[OK] をタップします。
体重計は画面に [End] と表示され、自動で電源がOFFになります。

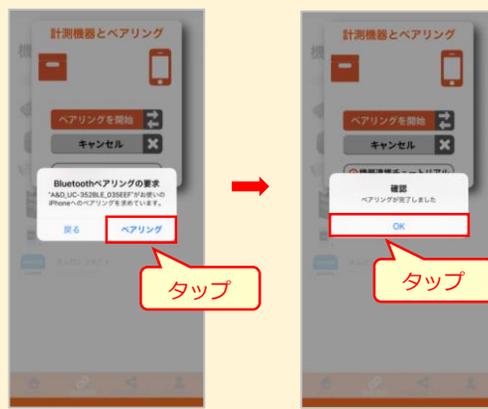

- 5 [計測を開始してください] 画面が表示されたら、体重測定を行います。
測定結果が表示されますので、[OK] をタップします。



【2回目以降】

アプリを起動して次の手順で測定します。

手順 1 ⇒ 5

※Bluetooth設定を [オン] にしてから行ってください。

「スマートフォン」：Bluetoothの設定はオンになっていますか
 A&Dの体重計からデータを送信するために必要です。
 設定方法はお使いの機種によって異なります。ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。ご契約会社へお問合せください。


Android

【初回設定】ペアリング設定を行い、測定します。

1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、リストから [A&D体重計] をタップします。



2 [ペアリングモードにしてください] と表示されたら [OK] をタップし、体重計の裏面のボタンを長押ししてください。

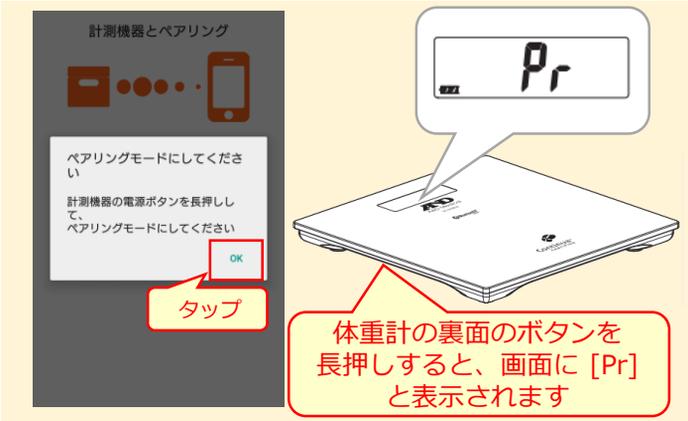

3 [計測機器とペアリング] が表示されたら、[ペアリングを開始] をタップします。




4 [ペア設定リクエスト] が表示されたら、[ペア設定する] をタップします。



[ペア設定リクエスト] 画面が表示されない場合

画面上部から下にスワイプして、[ペア設定リクエスト] を選択してください。

5 [計測を開始してください] 画面が表示されたら、体重測定を行います。

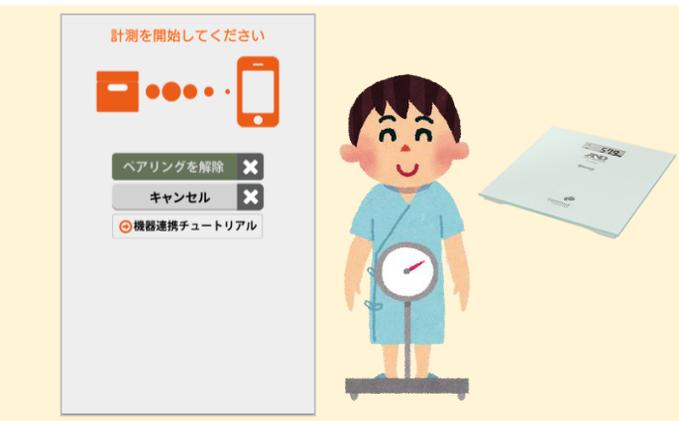

6 計測が終わると [機器のデータを受信しています] が表示されます。[機器連携データ] が表示されますので、[OK] をタップします。



【2回目以降】

アプリを起動して次の手順で測定します。

手順 **1** ⇒ **5** ⇒ **6**

※Bluetooth設定を [オン] にしてから行ってください。

【お問い合わせ】

Welby (ウェルビー) カスタマーサポート

電話 : 0120-095-655

メール : support@welby.jp