



【血糖測定器】かんたん連携

アークレイ血糖測定器で測定した結果を、NFC通信機能 (Felica®等) 搭載のスマートフォンでかんたんに取得することができます。(対応機種：グルコカードプラスケア)


⚠️ ご注意ください 測定タイミング(朝食前/朝食後/昼食前/昼食後/夕食前/夕食後/就寝前/夜間)は測定時間にもとづき、自動的に設定されます。

Step.1 測定結果をアプリに取得しましょう

- [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップします。
- リストから [アークレイ血糖測定器 グルコカードプラスケア GT-1840] をタップします。
- 読み取り画面が表示されます。



- アプリの画面表示はそのままの状態、血糖測定します。測定後、センサーを抜き取ります。
- 測定が終了したら、血糖測定器にスマートフォンをかざして、データを取得します。
- [機器連携データ] が表示されたら、[OK] をタップします。以上で登録は完了です。

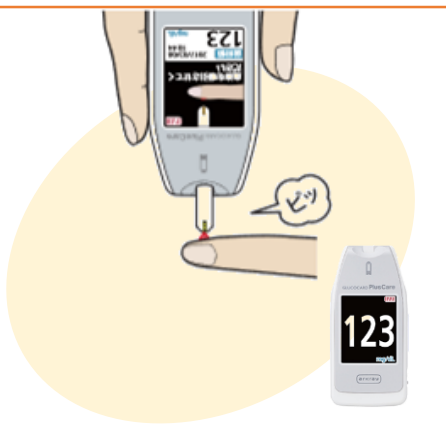

Step.2 アプリで記録を確認しましょう

- アプリのホーム画面で、[血糖値] をタップします。
- 連携したデータが確認できます。💡 入力したデータは、一覧やグラフで、かんたんに振り返ることができます。

