



自己血糖測定器

## 【グルコカードプライム】かんたん連携

Welbyマイカルテでは、【グルコカードプライム】で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

## Welbyマイカルテ「血糖値」画面説明

## 1 『記録画面』

戻る 血糖値

前日 01月27日 翌日

記録 一覧 グラフ

① 朝食前 mg/dL

朝食後 mg/dL

\* 昼食前 mg/dL

昼食後 mg/dL

夕食前 mg/dL

夕食後 mg/dL

就寝前 mg/dL

夜間 mg/dL

登録

## 2 『一覧画面』


戻る ② 血糖値

01/18 土	朝食前	107
	朝食後	123
	昼食前	101
	昼食後	121
	夕食前	102
	夕食後	100
01/31 金	朝食前	100
	朝食後	100
	昼食前	100
	昼食後	100
	夕食前	100
	夕食後	100
	就寝前	100
	夜間	100

③

	食前	食後
平均値	99.14	120.14
最高値	118.00	131.00
最小値	81.00	100.00
標準偏差	9.46	9.16
計測回数	27	27

## 3 『グラフ画面』

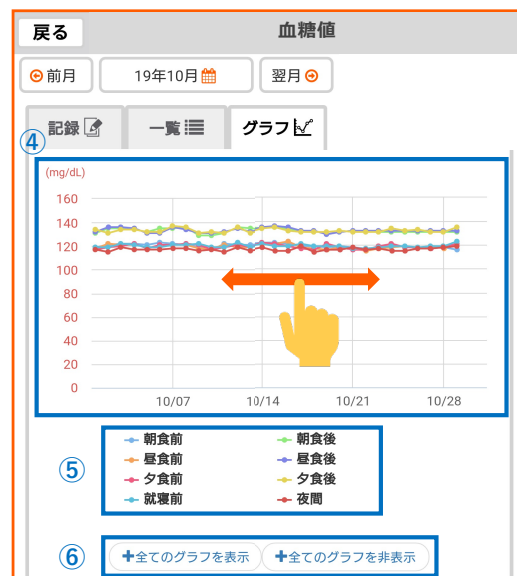

- ① 1日8回分の血糖測定データの入力が可能
- ② 入力データを一覧表示
- ③ 食前および食後の平均値、最高値、最小値、標準偏差、計測回数を表示
- ※食前：朝食前、昼食前、夕食前のデータを元に算出。  
食後：朝食後、昼食後、夕食後のデータを元に算出。

- ④ 画面を左右にスクロールし、表示範囲の変更可能
- ⑤ 表示したい項目の選択が可能
- ⑥ 全グラフの表示/非表示切り替え

## 連携を行う前に確認していただきたいこと

【グルコカードプライム】からWelbyマイカルテにデータを送信するために必要な事項となります。

- 「スマートフォン」の「Bluetooth」は「オン」になっていますか。  
設定方法は、お使いのスマートフォンの機種によって異なります。  
ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- インターネット通信が可能な環境でご利用ください。
- 「グルコカードプライム」の操作モードは「高機能」になっていますか。
- 「グルコカードプライム」の測定時間帯設定は「自動」になっていますか。  
※「測定時間帯」が設定されていないとデータの連携ができません。
- 「グルコカードプライム」の通信設定は「自動」になっていますか。また、測定後自動送信が「オン」になっていますか。  
詳しくはグルコカードプライムの取扱説明書をご確認ください。

# 【グルコカードプライム】をはじめてご利用の方

## グルコカードプライムでの操作手順

- 1 グルコカードプライムの電源を長押しして設定画面を表示し、  
[機器設定]-[Bluetooth設定]-[デバイス登録]の順に開きます。



## グルコカードプライムでの操作手順

- 2 リストの中から[未登録]となっている項目を選択し、  
[GT-7510のパスワード]が空欄の画面を表示します。



- 3 [Welbyマイカルテ]のタブバーにある  
[機器連携]をタップします。



## 【グルコカードプライム】をはじめてご利用の方

4

リストから[アークレイ血糖測定器 グルコカードプライムGT-7510]をタップします。



5

[ペアリング] 画面が表示されたら、[ペアリングを開始する] をタップします。



## 【グルコカードプライム】をはじめてご利用の方

6

[Bluetoothペアリングの要求]の画面が表示されます。

2 で表示した画面に血糖測定器のパスワードが表示されますので、表示されたパスワードを入力し [ペアリング] をタップします。



7

[機器とのペアリングが成功しました]の表示が出たらペアリング完了です。



【グルコカードプライム】をはじめてご利用の場合の設定は以上で終了です。

# 【グルコカードプライム】のご利用にあたって ご留意いただきたいこと

- 連携操作をすると、血糖測定器本体に保存されているデータが全て取り込まれます（最大1100件）。『Welbyマイカルテ』に過去のデータが記録されている場合は上書きされます。計測データが複数ある場合は取得した期間と件数を表示します。データ取得後に表示されるまで時間がかかることがあります。

## 機器連携済みの方

- 1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップします。



- 2 リストから[アークレイ血糖測定器 グルコカードプライムGT-7510]をタップします。



3

[計測開始] 画面が表示されますので、  
血糖測定を行ってください。

※このときスマートフォンの画面は、  
[計測開始] 画面が表示されている状態である  
ことを確認してください。



4

血糖測定が終了したらセンサーを抜き取っ  
てください。[計測結果を受信中...]画面が  
表示され、測定結果が反映されます。  
[計測結果]画面の [登録する] をタップ  
します。

※血糖測定器は自動で電源がOFFになります。



## 計測データが複数ある場合

計測データが複数ある場合  
は取得した期  
間と件数を表  
示します。

データ取得後  
に表示される  
まで時間がか  
かることがあ  
ります。



ご不明な点がございましたら、  
Welbyカスタマーサポートまでお問い合わせください。

### 【お問い合わせ】

Welby (ウェルビー) カスタマーサポート

電話 : 0120-095-655 (受付時間 平日10:00~17:30)

メール : support@welby.jp

※掲載しているアプリ画面は  
バージョン2.5.2です。