



# 【血管年齢】かんたん連携

FUKUDA DENSHA

welby マイカルテ

iPhone版

Android版

フクダ電子血管年齢 (CAVI) 測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。(対応機種: VaSera VS-3000E/TE)

## Step.1 測定結果をアプリに取得しましょう

1 [Welbyマイカルテ] の [血管年齢] をタップし、[QRコードから読み込む] をタップします。

[iPhone]



[Android]



2 [QRコードにかざしてください] 画面が表示されたら、レポートの裏面にあるQRコードにかざして読み込みます。

3 読み込んだデータが表示されます。[OK] をタップし、データを登録します。

【表面】

【裏面】



⚠️ ご注意ください

[キャンセル] または画面を閉じると、データは保存されません。

## Step.2 アプリで記録を確認しましょう

1 アプリのホーム画面で、[血管年齢] をタップします。

2 連携したデータが確認できます。



入力したデータは、一覧やグラフでかんたんに振り返ることができます。



【お問い合わせ】  
Welby (ウェルビー) カスタマーサポート  
電話 : 0120-095-655  
メール : support@welby.jp

※掲載しているアプリ画面はiOS版 (バージョン1.2) です。