



【血圧計】かんたん連携

オムロン血圧計で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

(対応機器：HEM-9200T)

iPhone

◎ ◎ 連携を行う前に ◎ ◎ 血圧計の「測定/停止」ボタンを押した時“P”が表示されたら「測定/停止」ボタンを押してOFFにしてください。

【初回設定】Bluetooth 設定とペア設定を行い、測定します。


1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、機器連携リストから [オムロン血圧計] をタップします。

2 ["マイカルテ"がアクセサリに接続できるようにするには、Bluetooth をオンにしてください。] と表示されたら、[設定] をタップします。[Bluetooth] をオンにします。



3 マイカルテに戻ります。[計測を開始してください] 画面が表示されますので、血圧測定を行います。

4 測定が終了すると、[Bluetoothペアリングの要求] が表示されます。血圧計の背面に貼られているシールに記載されている [PIN] コードを入力し、[ペアリング] をタップします。

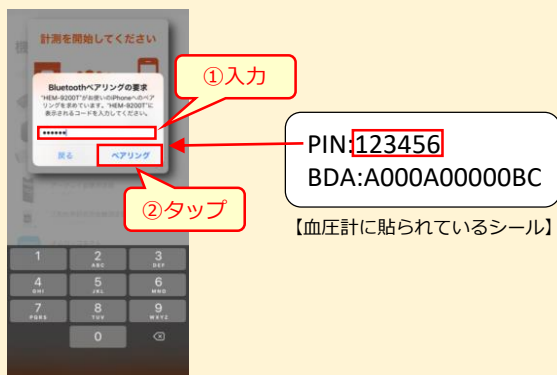

5 測定結果が表示されますので、[OK] をタップします。



入力したデータは、一覧やグラフでかんたんに振り返ることができます。

登録したデータは、測定時間によって [朝1]、[朝2]、[夜1]、[夜2] に自動で表示されます。
(※朝：2時～11時59分、夜：12時～25時59分)



【2回目以降】

アプリを起動して、手順 1 ⇒ 3 ⇒ 5 で測定します。

※Bluetooth設定を [オン] にしてから行ってください。

⚠️ ご注意ください

- 機器連携を行った際、必ず一度、測定結果を登録してください。(手順 5 を行ってください。)
連携設定後、1回分の測定結果を登録しないと、測定値の日時が記録されないため、以後の測定結果を正しく取り込むことができません。
- 専用ACアダプタでご使用の場合でも、必ず電池を入れた状態でご利用ください。
血圧計は電源がない状態では内蔵の時計がリセットされます。ACアダプタのコンセントを抜いたときに、蓄積した測定データが取り込めなくなってしまう可能性があります。

◎ ◎ **連携を行う前に** ◎ ◎

■ 血圧計の「測定/停止」ボタンを押した時 “P”が表示されたら「測定/停止」ボタンを押してOFFにしてください。

■ 「スマートフォン」：位置情報はオンになっていますか
血圧計からデータを送信するために必要です。設定方法はお使いの機種によって異なります。ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

【初回設定】Bluetooth 設定とペア設定を行い、測定します。


1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、リストから [オムロン血圧計] をタップします。



2 [この機器でアプリがBluetoothをONにしようとしています]が表示されたら、[許可する]をタップします。血圧を測定します。




3 [ペア設定リクエスト]が表示されたら、血圧計の背面に貼られているシールに記載されている [PIN] コードを入力し、[OK] をタップします。

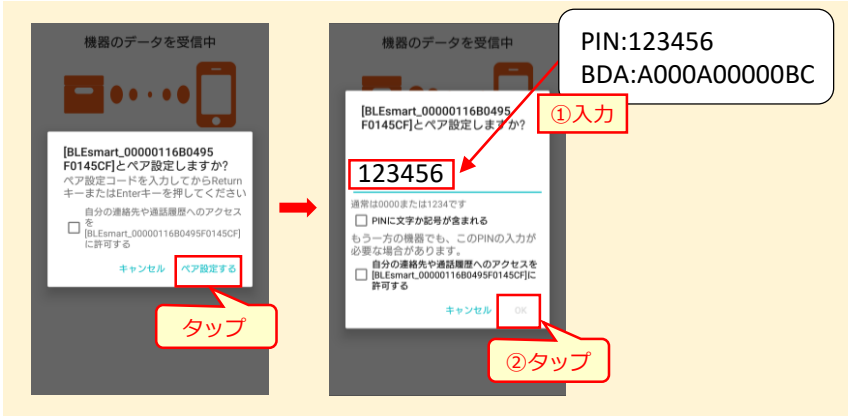

【ペア設定リクエスト】画面が表示されない場合

画面上部から下にスワイプして、[ペア設定リクエスト]を選択してください。

4 自動で測定結果がアプリに送付されます。[機器連携データ]が表示されたら [OK] をタップします。

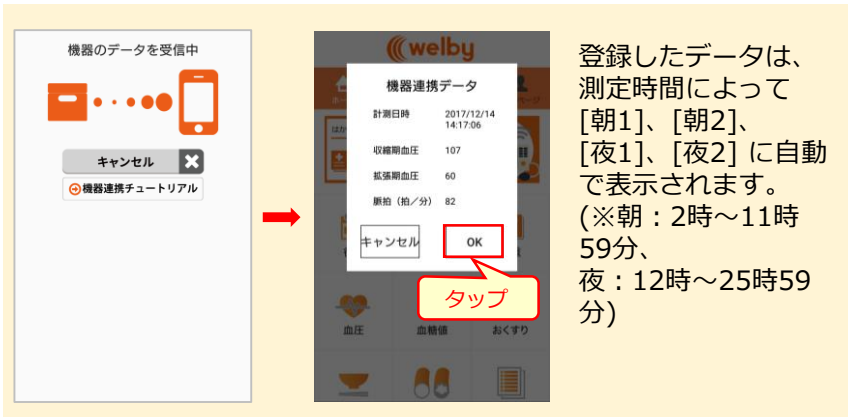

【2回目以降】

アプリを起動して下記の手順で測定します。

手順 **1** ⇒ **4**

※Bluetooth設定、位置情報を [オン] にしてから行ってください。

💡 入力したデータは一覧やグラフでかんたんに振り返ることができます。



⚠️ ご注意ください

■ **機器連携を行った際、必ず一度、測定結果を登録してください。(手順 4 を行ってください。)**
連携設定後、1回分の測定結果を登録しないと、測定値の日時が記録されないため、以後の測定結果を正しく取り込むことができません。

■ **専用ACアダプタでご使用の場合でも、必ず電池を入れた状態でご利用ください。**
血圧計は電源がない状態では内蔵の時計がリセットされます。ACアダプタのコンセントを抜いたときに、蓄積した測定データが取り込めなくなってしまう。

【お問い合わせ】
Welby (ウェルビー) カスタマーサポート
電話 : 0120-095-655
メール : support@welby.jp