



血圧計

OMRON ((welby)) マイカルテ

## 【HEM-9200T】かんたん連携

Welbyマイカルテでは、【HEM-9200T】で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

### Welbyマイカルテ「血圧」画面説明

戻る 血圧 ? 設定

一覧 グラフ サマリー

QRコードから読み込む

2019年12月13日(金)

① 朝1回目 10:43 ③ オムロン ⑤

② 血圧: 124/89 (mmHg) 脈拍: 84 (拍/分)

朝2回目 10:45 ④ オムロン

血圧: 119/85 (mmHg) 脈拍: 84 (拍/分)

夜1回目 15:30 オムロン

血圧: 126/92 (mmHg) 脈拍: 88 (拍/分)

夜2回目 22:00 オムロン

血圧: 108/92 (mmHg) 脈拍: 82 (拍/分)

2019年12月12日(木)

朝1回目 09:30 手入力

血圧: 108/66 (mmHg) 脈拍: 62 (拍/分)

#### 『一覧画面』

##### ① タイミング 時間

登録したデータは、測定時間によって [朝1回目]、[朝2回目]、[夜1回目]、[夜2回目] に自動で表示されます。  
(朝: 0時~11時59分、夜: 12時~23時59分)

##### ② 血圧: 収縮期血圧 (上) / 拡張期血圧 (下) [mmHg]

##### ③ 入力状況 (機器連携または手入力)

##### ④ 脈拍 [拍/分]

##### ⑤ 不規則脈波 (IHB) ※発現

🔴 機器から検知したまたは、手入力によるIHBあり

🟡 機器から検知結果がでなかったまたは、手入力によるIHBなし

— 検知できる機器を利用していないまたは入力なし

※不規則脈波 (IHB) :

血圧測定中の脈波のリズムの乱れを検知し、表示させる機能です。  
血圧計をご利用の方はお持ちの血圧計の取扱説明書などでIHB検知の有無をご確認下さい。

一覧 グラフ サマリー

<< 前の月 直近30日

朝

	収縮期	拡張期	脈拍
平均値	113.7	85.0	63.7
最高値	120	88	75
最低値	106	82	56
標準偏差	7.1	3.0	10.0
① 計測回数	3	3	3
② IHB回数	-	-	2

#### 『サマリー画面』

##### ① 計測回数: 血圧を登録した回数を表示

##### ② IHB回数: IHBの記録回数を表示

### 連携を行う前に確認していただきたいこと

【HEM-9200T】からWelbyマイカルテにデータを送信するために必要な事項となります。

■スマートフォンの「Bluetooth」は「オン」になっていますか。

設定方法は、お使いのスマートフォンの機種によって異なります。

ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。かご契約会社へお問合せ下さい。

■インターネット通信が可能な環境でご利用ください。

# 【HEM-9200T】をはじめてご利用の方

1

[Welbyマイカルテ]のタブバーにある  
[機器連携]をタップします。



2

リストから [オムロン血圧計 HEM-9200T]  
をタップします。



3

[計測を開始してください]と表示され  
たら、血圧計の電源を入れて、血圧測定  
を行います。



## 【HEM-9200T】をはじめてご利用の方


4

血圧を測定し終わると、[Bluetoothペアリングの要求]画面が表示されます。



5

血圧計の背面に貼られているシールに記載されているコードを入力し、[ペアリング]をタップします。

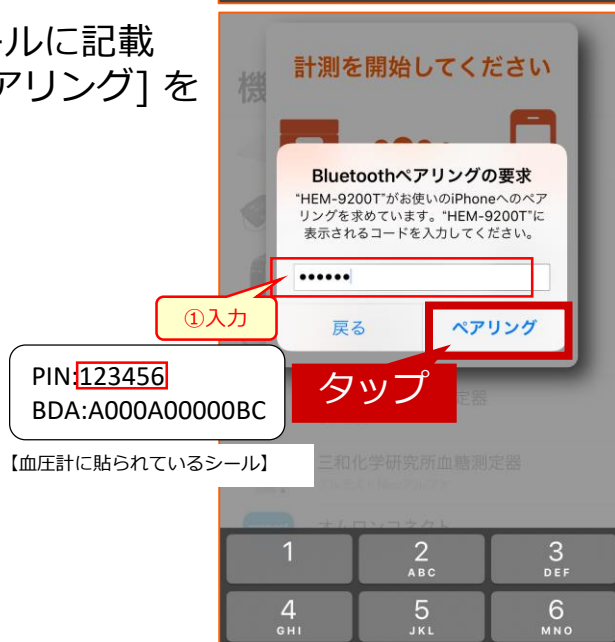

5


機器のデータを受信します。



## 【HEM-9200T】をはじめてご利用の方

7

[測定結果]が表示されますので[OK]をタップします。

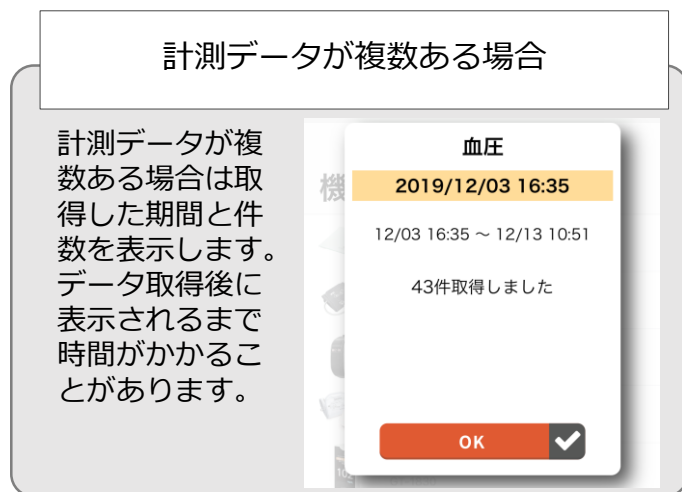

【HEM-9200T】をはじめてご利用の場合の設定は以上で終了です。

## 【HEM-9200T】のご利用にあたってご留意いただきたいこと

- **ペアリングを行った際や血圧計の電池を交換した際は、一度必ず測定結果を登録してください。**  
ペアリング設定後または電池交換後に1回分の測定結果を登録することで、測定値の日時が記録されます。以後の測定結果を正しく取り込むために一度測定結果を登録してください。
- **専用ACアダプタ（別売り）でご使用の場合でも、必ず電池を入れた状態でご利用ください。**  
血圧計は電源がない状態では内蔵の時計がリセットされます。ACアダプタのコンセントを抜いたときに、蓄積した測定データが取り込めなくなってしまう可能性があります。
- **【HEM-9200T】に保存された測定データは、『Welbyマイカルテ』に取り込まれると、本体から削除されます。**
- 測定データ受信中に接続が切断される等、接続不良が起きた場合には、取り込み途中の測定データが消えてしまう可能性がございます。必ず電波状況の良いところでデータの受信を行っていただき、受信が終わるまではアプリを操作しないでください。

## 2回目以降の方

1

[Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップします。



2

リストから [オムロン血圧計 HEM-9200T] をタップします。



3

[計測を開始してください] と表示されたら、血圧計の電源を入れて、血圧測定を行います。



4

[測定結果] が表示されますので [OK] をタップします。

### 計測データが複数ある場合

計測データが複数ある場合は取得した期間と件数を表示します。データ取得後に表示されるまで時間がかかることがあります。



ご不明な点がございましたら、  
Welbyカスタマーサポートまでお問い合わせください。

### 【お問い合わせ】

Welby（ウェルビー）カスタマーサポート

電話：0120-095-655（受付時間 平日10:00～17:30）

メール：support@welby.jp