



【体重・体組成計】かんたん連携

オムロンコネク体重・体組成計で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

(対応機器：HBF-255T-W、HBF-255T-R、HBF-255T-BK)

◎ ◎ 連携を行う前に ◎ ◎

ご利用いただくためには下記のソフトウェアインストールと設定が必要です。

■ アプリ「OMRON connect」

- ・インストールはお済みですか
測定結果を連携するには、オムロンコネクのアプリが必要です。

■ 「スマートフォン」

- ・Bluetoothの設定はオンになっていますか
オムロンコネクの体重・体組成計からデータを送信するために必要です。
設定方法はお使いの機種によって異なります。ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。


【初回設定】血圧計との連携設定を行いましょ

- 「Welbyマイカルテ」の操作は の番号です。
- 「オムロンコネク」の操作は の番号です。

- 1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップします。
- 2 リストから [オムロンコネク] をタップします。
- 3 ご利用の機器をタップします。



- 4 機器の登録を求められますので、[OK] をタップして登録操作を進めてください。
機器の設定が完了したら [OK] をタップします。
データを『Welbyマイカルテ』に共有することを尋ねられましたら、[同意する] をタップします。
- 5 設定が完了すると、選択した機器の右横に [連携] が表示されます。

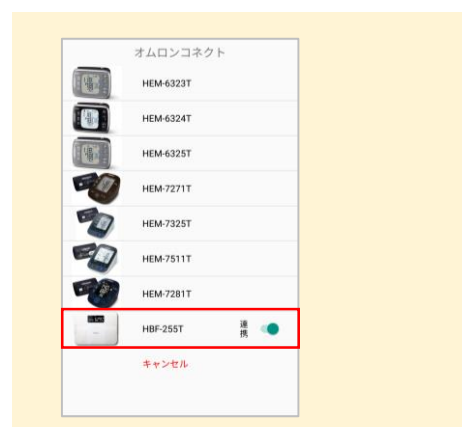

Step.1 体重を測定し、測定結果をアプリに取得しましょう

- 「Welbyマイカルテ」の操作は の番号です。
- 「オムロンコネク」の操作は の番号です。


1 体重を測定します。



2 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、リストから [オムロンコネク] をタップします。ご利用の機器をタップします。



3 『オムロンコネク』が体重・体組成計と通信を行い、測定したデータが転送されますので、[OK] をタップします。

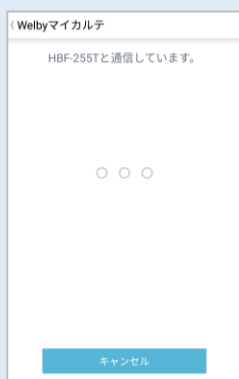

4 『Welbyマイカルテ』に測定結果が表示されますので、[OK] をタップします。



⚠️ ご注意ください

※機器連携を行った際、必ず一度、測定結果を登録してください。(Step1.を行ってください。)

連携設定後、1回分の測定結果を登録しないと、測定値の日時が記録されないため、以後の測定結果を正しく取り込むことができません。

Step.2 アプリで記録を確認しましょう

1 アプリのホーム画面で、[血压] をタップします。

2 連携したデータが確認できます。



入力したデータは、一覧やグラフでかんたんに振り返ることができます。



戻る 体重

前月 16年06月 翌月

記録 一覧 グラフ

年月日	曜日	時間	体重
06/01	水	08:10	62.00
06/02	木	08:30	61.50
06/03	金	08:10	62.10
06/04	土	08:10	62.40
06/05	日	08:00	62.00
06/06	月	08:00	61.50
06/07	火	08:20	61.10
06/08	水	08:10	60.90
06/09	木	08:15	61.30
06/10	金	08:10	60.90
06/11	土	08:30	60.50



【お問い合わせ】

Welby (ウェルビー) カスタマーサポート

電話 : 0120-095-655

メール : support@welby.jp