

# 【体重・体組成計】かんたん連携

OMRON **welby** マイカルテ

iPhone版

オムロンコネクト体重・体組成計で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

(対応機器： HBF-255T-W  
HBF-255T-R、HBF-255T-BK)

## ◎ ◎ 連携を行う前に ◎ ◎

ご利用いただくためには下記のソフトウェアインストールと設定が必要です。

### ■ アプリ「OMRON connect」

#### ・インストールはお済みですか

測定結果を連携するには、オムロンコネクトのアプリが必要です。



### ■ 「スマートフォン」

#### ・Bluetoothの設定はオンになっていますか

オムロンコネクトの体重計からデータを送信するために必要です。

設定方法はiPhoneの取扱説明書をご覧ください。

## 【初回設定】 体重・体組成計との連携設定を行い、測定します。

- 「Welbyマイカルテ」の操作は  の番号です。
- 「オムロンコネクト」の操作は  の番号です。

### 1 [Welbyマイカルテ] を起動します。

[ヘルスケア] の [データのアクセス] が開き、[“マイカルテ”は通知を送信します。よろしいですか?] と表示されたら、[OK] をタップします。

[すべてのカテゴリ オン] をタップし、[許可] をタップします。



※ 既に [Welbyマイカルテ] をご利用いただいている場合は、[ヘルスケア] を起動し、[すべてのカテゴリ オン] に設定されているか確認してください。

### 2 [Welbyマイカルテ] のログイン画面が表示されますので、新規ユーザー登録をします。タブバーにある [機器連携] をタップし、機器連携リストから [オムロンコネクト] をタップします。



### 3 ご利用の機器をタップします。「OMRON」ロゴ画面と [Welbyマイカルテ] が交互に表示されますので、そのままお待ちください。



**4** オムロンコネクットの登録画面に切り替わります。機器の登録を求められますので、[OK] をタップして登録操作を進めてください。


**5** 複数の利用者でご利用いただけます。設定する人（番号）を選択し、[OK] をタップします。

**6** オムロンコネクットのメニュー画面が表示されたら、左上の設定ボタン（三本の線のアイコン）をタップし、[連携アプリ・サービス] をタップします。



**7** [ヘルスケア] をタップします。[すべてのカテゴリをオン] をタップし、右上の [許可] をタップします。左上の設定ボタンをタップし、[ホーム] をタップします。

**8** 体重計の電源を入れて体重測定を行います。測定後、画面を下方方向へスワイプすると、測定したデータに更新されます。画面左上に表示されている [マイカルテ] をタップします。

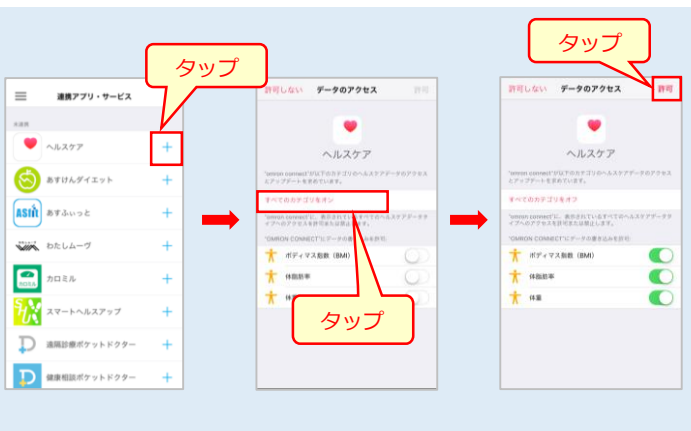

**9** 測定結果が表示されますので、[OK] をタップします。

⚠️ ご注意ください

※機器連携を行った際、必ず一度、測定結果を登録してください。(手順 9 を行ってください。)

連携設定後、1 回分の測定結果を登録しないと、測定値の日時が記録されないため、以後の測定結果を正しく取り込むことができません。

💡 アプリで記録を確認しましょう

アプリのホーム画面で、[体重] をタップ、連携したデータが確認できます。



また、入力したデータは、一覧やグラフでかんたんに振り返ることができます。

【2回目以降】

アプリを起動して下記の手順で測定します。

手順 2 ⇒ 3 ⇒ 8 ⇒ 9

※Bluetooth設定を [オン] にしてから行ってください。

【お問い合わせ】  
 Welby (ウェルビー) カスタマーサポート  
 電話 : 0120-095-655  
 メール : support@welby.jp