



【血圧計】かんたん連携

OMRON (welby) マイカルテ

Android版

オムロンコネクト血圧計で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

(対応機器：HEM-6323T, HEM-6324T, HEM-6325T, HEM-7271T, HEM-7281T, HEM-7282T, HEM-7325T, HEM-7511T)

◎ ◎ 連携を行う前に ◎ ◎

ご利用いただくためには下記のソフトウェアインストールと設定が必要です。

■ アプリ「OMRON connect」

・インストールはお済ですか

測定結果を連携するには、オムロンコネクトのアプリが必要です。

■ 「スマートフォン」



◆ Bluetoothの設定はオンになっていますか

◆ 位置情報はオンになっていますか

オムロンコネクトの血圧計からデータを送信するために必要です。

設定方法はお使いの機種によって異なります。ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。ご契約会社へお問合せください。


【初回設定】血圧計との連携設定を行いましょ

- 「Welbyマイカルテ」の操作は  の番号です。
- 「オムロンコネクト」の操作は  の番号です。

1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップします。

2 リストから [オムロンコネクト] をタップします。

3 ご利用の機器をタップします。

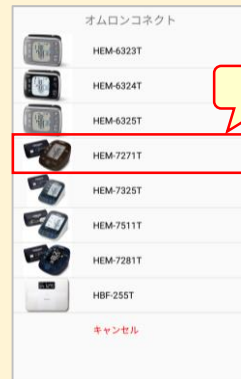

4 機器の登録を求められますので、[OK] をタップして登録操作を進めてください。

機器の設定が完了したら [OK] をタップします。



データを『Welbyマイカルテ』に共有することを尋ねられましたら、[同意する] をタップします。

5 設定が完了すると、選択した機器の右横に [連携] が表示されます。

OMRON connect の操作手順に従って操作を行ってください

「」から先は別アプリ OMRON connect での操作になります。

OMRON connect での操作「」まで。

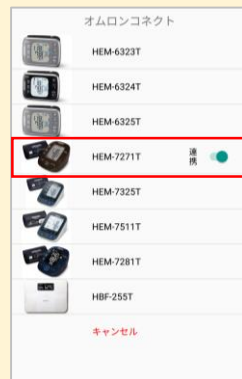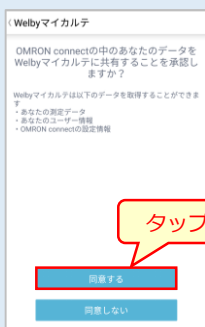

Step.1 血圧を測定し、測定結果をアプリに取得しましょう


1 血圧を測定します。

2 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、リストから [オムロンコネク] をタップします。ご利用の機器をタップします。



3 『オムロンコネク』が血圧計と通信を行い、測定したデータが転送されますので、[OK] をタップします。

4 『Welbyマイカルテ』に測定結果が表示されますので、[OK] をタップします。

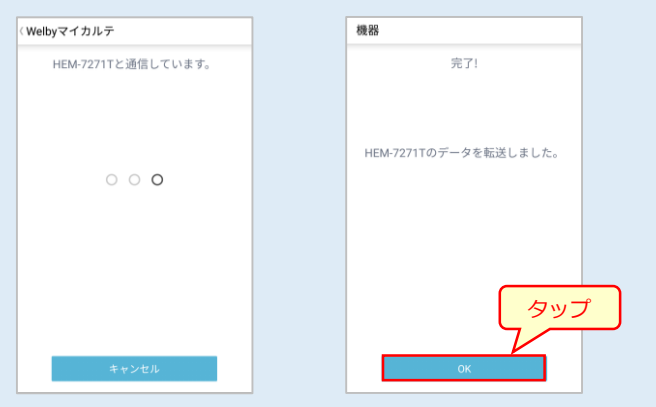

登録したデータは、測定時間によって [朝1]、[朝2]、[夜1]、[夜2] に自動で表示されます。
(※朝：2時～11時59分、夜：12時～25時59分)

⚠️ ご注意ください

■ **機器連携を行った際、必ず一度、測定結果を登録してください。(Step.1を行ってください。)**

連携設定後、1回分の測定結果を登録しないと、測定値の日時が記録されないため、以後の測定結果を正しく取り込むことができません。

■ **専用ACアダプタでご使用の場合でも、必ず電池を入れた状態でご利用ください。**

血圧計は電源がない状態では内蔵の時計がリセットされます。ACアダプタのコンセントを抜いたときに、蓄積した測定データが取り込めなくなってしまう可能性があります。

Step.2 アプリで記録を確認しましょう

1 アプリのホーム画面で、[血圧] をタップします。

2 連携したデータが確認できます。

💡 入力したデータは、一覧やグラフでかんたんに振り返ることができます。



【お問い合わせ】
Welby (ウェルビー) カスタマーサポート
電話 : 0120-095-655
メール : support@welby.jp