



【血圧計】かんたん連携

iPhone版

(対応機器：HEM-6323T

HEM-6324T,HEM-6325T,HEM-7271T

HEM-7281T,HEM-7282T,HEM-7325T,HEM-7511T)

オムロンコネクト血圧計で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

◎ ◎ 連携を行う前に ◎ ◎

ご利用いただくためには下記のソフトウェアインストールと設定が必要です。

■ アプリ「OMRON connect」

・インストールはお済みですか

測定結果を連携するには、オムロンコネクトのアプリが必要です。

■ 「スマートフォン」

・Bluetoothの設定はオンになっていますか

オムロンコネクトの血圧計からデータを送信するために必要です。

設定方法はiPhoneの取扱説明書をご覧ください。ご契約会社へお問合せください。

【初回設定】血圧計との連携設定を行い、測定します。

● 「Welbyマイカルテ」の操作は  の番号です。

● 「オムロンコネクト」の操作は  の番号です。

1 [Welbyマイカルテ] を起動します。

[ヘルスケア] の [データのアクセス] が開き、["マイカルテ"は通知を送信します。よろしいですか?] と表示されたら、[OK] をタップします。

[すべてのカテゴリ オン] をタップし、[許可] をタップします。



※ 既に [Welbyマイカルテ] をご利用いただいている場合は、[ヘルスケア] を起動し、[すべてのカテゴリ オン] に設定されているか確認してください。

2 [Welbyマイカルテ] のログイン画面が表示されますので、新規ユーザー登録をします。タブバーにある [機器連携] をタップし、機器連携リストから [オムロンコネクト] をタップします。



3 ご利用の機器の画像をタップします。「OMRON」ロゴ画面と [Welbyマイカルテ] が交互に表示されますので、そのままお待ちください。



4 オムロンコネクットの登録画面に切り替わります。機器の登録を求められますので、[OK] をタップして登録操作を進めてください。

5 複数の利用者でご利用いただける機器もございます。その場合は設定する人(番号)を選択し、[OK] をタップします。


6 オムロンコネクットのメニュー画面が表示されたら、左上の設定ボタン(三本の線のアイコン)をタップし、[連携アプリ・サービス] をタップします。

OMRON connect の操作手順に従って操作を行ってください

OMRON connect での操作になります。



タップ

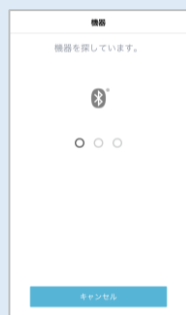


タップ



タップ

7 [ヘルスケア] をタップします。[すべてのカテゴリをオン] をタップし、右上の [許可] をタップします。左上の設定ボタンをタップし、[ホーム] をタップします。

8 血圧計の電源を入れて血圧測定を行います。測定後、画面を下方向へスワイプすると、測定したデータに更新されます。画面左上に表示されている [マイカルテ] をタップします。

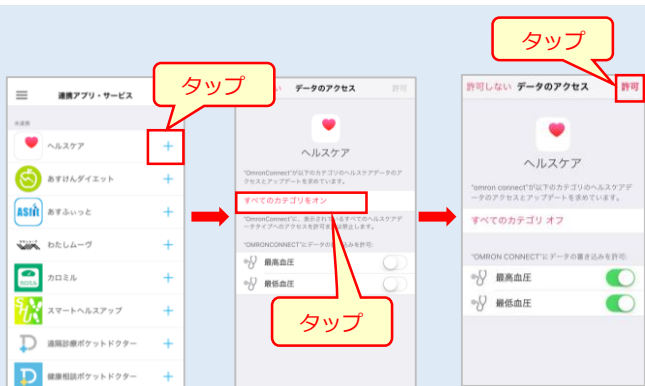

タップ

タップ

タップ



②タップ

①スワイプ

OMRON connect での操作になります。

9 測定結果が表示されますので、[OK] をタップします。



タップ

登録したデータは、測定時間によって [朝1]、[朝2]、[夜1]、[夜2] に自動で表示されます。(※朝：2時～11時59分、夜：12時～25時59分)

⚠️ ご注意ください

■ **機器連携を行った際、必ず一度測定結果を登録してください。(手順 9 を行ってください。)**
 連携設定後、1回分の測定結果を登録しないと、測定値の日時が記録されないため、以後の測定結果を正しく取り込むことができません。

■ **専用ACアダプタでご使用の場合でも、必ず電池を入れた状態でご利用ください。**
 血圧計は電源がない状態では内蔵の時計がリセットされます。ACアダプタのコンセントを抜いたときに、蓄積した測定データが取り込めなくなってしまう。

💡 アプリで記録を確認しましょう

アプリのホーム画面で、[血圧] をタップ、連携したデータが確認できます。



タップ

また、入力したデータは、一覧やグラフでかんたんに振り返ることができます。



【2回目以降】 アプリを起動して下記の手順で測定します。

手順 **2** ⇒ **3** ⇒ **8** ⇒ **9**

※Bluetooth設定を [オン] にしてから行ってください。

【お問い合わせ】
 Welby (ウェルビー) カスタマーサポート
 電話 : 0120-095-655
 メール : support@welby.jp