

【活動量計】かんたん連携

オムロンコネク活動量計で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

(対応機器：HJA-405T-W、HJA-405T-G、HJA-405T-WR、HJA-405T-BK)

◎ ◎ 連携を行う前に ◎ ◎

ご利用いただくためには下記のソフトウェアインストールと設定が必要です。

- 「オムロンコネク 活動量計」
電源を入れ、あらかじめ設定を行ってください。
- アプリ「OMRON connect」
 - ・インストールはお済みですか
測定結果を連携するには、オムロンコネクのアプリが必要です。
- 「スマートフォン」
 - ・Bluetoothの設定はオンになっていますか
オムロンコネクの活動量計からデータを送信するために必要です。
設定方法はお使いの機種によって異なります。ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

【初回設定】活動量計との連携設定を行いましょ

- 「Welbyマイカルテ」の操作は ■ の番号です。
- 「オムロンコネク」の操作は ■ の番号です。

- 1** [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップします。
- 2** リストから [オムロンコネク] をタップします。
- 3** ご利用の機器をタップします。



- 4** 機器の登録を求められますので、[OK] をタップして登録操作を進めてください。機器本体の設定を行っているか尋ねられましたら [機器本体は既に設定済み] をタップしてください。機器の設定が完了したら [OK] をタップします。
データを『Welbyマイカルテ』に共有することを尋ねられましたら、[同意する] をタップします。
- 5** 設定が完了すると、選択した機器の右横に [連携] が表示されます。

OMRON connect の操作手順に従って操作を行ってください

OMRON connect での操作手順。


OMRON connect での操作手順。



Step.1 活動量計の測定結果をアプリに取得しましょう



1 活動量計で測定します。

2 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、リストから [オムロンコネク] をタップします。ご利用の機器をタップします。

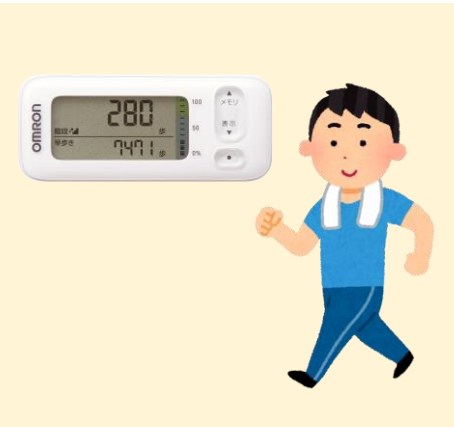


3 [機器を探しています。] と表示されたら活動量計の「▼ (表示)」と「●」ボタンを同時に2秒ほど長押しします。

4 『オムロンコネク』が活動量計と通信を行い、測定したデータが転送されますので、[OK] をタップします。

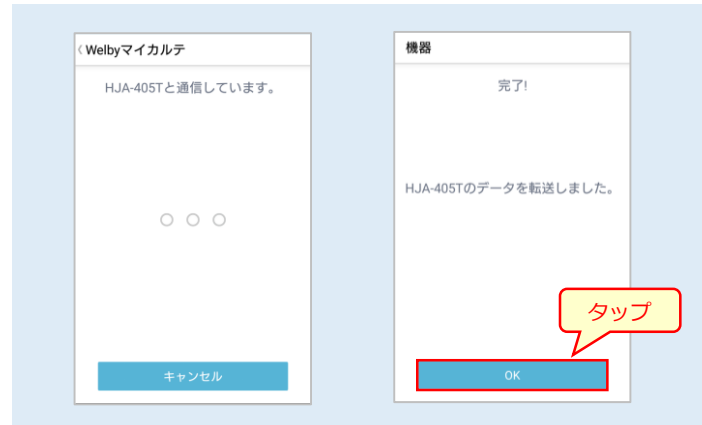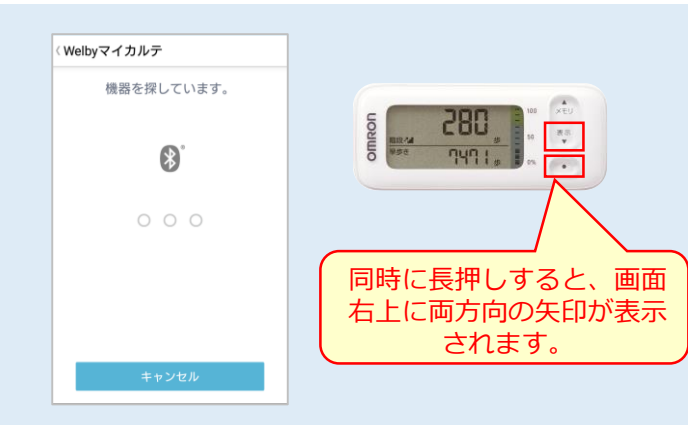

5 『Welbyマイカルテ』に測定結果が表示されますので、[OK] をタップします。

アプリで記録を確認しましょう

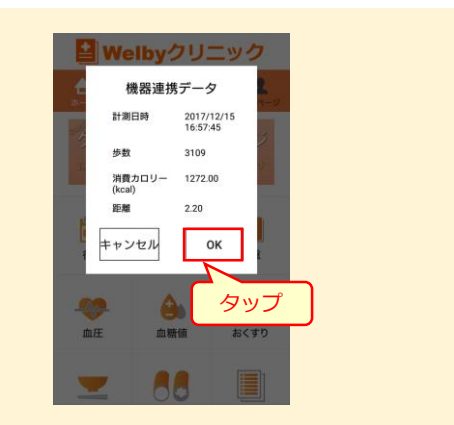

アプリのホーム画面で、[運動] をタップし、連携したデータが確認できます。



また、入力したデータは、一覧やグラフでかんたんに振り返ることができます。



⚠️ ご注意ください

■ 連携操作をすると、活動量計のデータと『Welbyマイカルテ』に取り込まれているデータの差分が取り込まれます。

■ 過去30日分遡って記録が取り込まれ、他アプリ等でデータが記録されている場合は、『オムロンコネク』のデータに上書きされます。

【お問い合わせ】
Welby (ウェルビー) カスタマーサポート
電話 : 0120-095-655
メール : support@welby.jp