

# 【活動量計】かんたん連携

OMRON (welby) マイカルテ

iPhone版



オムロンコネク活動量計で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。(対応機器：HJA-405T-W、HJA-405T-G、HJA-405T-WR、HJA-405T-BK)

## ◎ ◎ 連携を行う前に ◎ ◎

ご利用いただくためには下記のソフトウェアインストールと設定が必要です。

- 「オムロンコネク 活動量計」  
電源を入れ、あらかじめ設定を行ってください。
- アプリ「OMRON connect」
  - ・インストールはお済みですか  
測定結果を連携するには、オムロンコネクのアプリが必要です。
- 「スマートフォン」
  - ・Bluetoothの設定はオンになっていますか  
オムロンコネクの活動量計からデータを送信するために必要です。  
設定方法はiPhoneの取扱説明書をご覧ください。

## 【初回設定】活動量計との連携設定を行い、測定します。

- 「Welbyマイカルテ」の操作は  の番号です。
- 「オムロンコネク」の操作は  の番号です。

- 1** [Welbyマイカルテ] を起動します。  
[ヘルスケア] の [データのアクセス] が開き、[“マイカルテ”は通知を送信します。よろしいですか?] と表示されたら、[OK] をタップします。  
[すべてのカテゴリ オン] をタップし、[許可] をタップします。



※ 既に [Welbyマイカルテ] をご利用いただいている場合は、[ヘルスケア] を起動し、[すべてのカテゴリ オン] に設定されているか確認してください。

- 2** [Welbyマイカルテ] のログイン画面が表示されますので、新規ユーザー登録をします。  
タブバーにある [機器連携] をタップし、機器連携リストから [オムロンコネク] をタップします。

- 3** ご利用の機器をタップします。  
「OMRON」ロゴ画面と [Welbyマイカルテ] が交互に表示されますので、そのままお待ちください。






**4** オムロンコネクットの登録画面に切り替わります。機器の登録を求められますので、[OK] をタップして登録操作を進めてください。

**5** 身長や歩幅等の登録も行い、機器の設定が完了したら [OK] をタップします。

**6** オムロンコネクットのメニュー画面が表示されたら、左上の設定ボタン（三本の線のアイコン）をタップし、[連携アプリ・サービス] をタップします。



OMRON connect の操作手順に従って操作を行ってください

アイコンから先は別アプリ  
OMRON connect での操作になります。

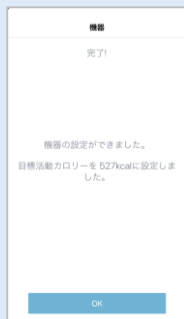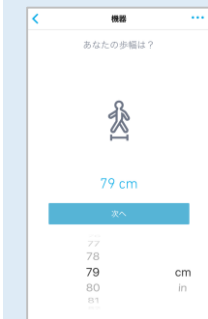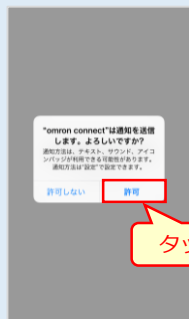

**7** [ヘルスケア] をタップします。[すべてのカテゴリをオン] をタップし、右上の [許可] をタップします。左上の設定ボタンをタップし、[ホーム] をタップします。

**8** 活動量計の電源を入れます。画面を下方向へスワイプすると、測定したデータに更新されます。画面左上に表示されている [<マイカルテ] をタップします。

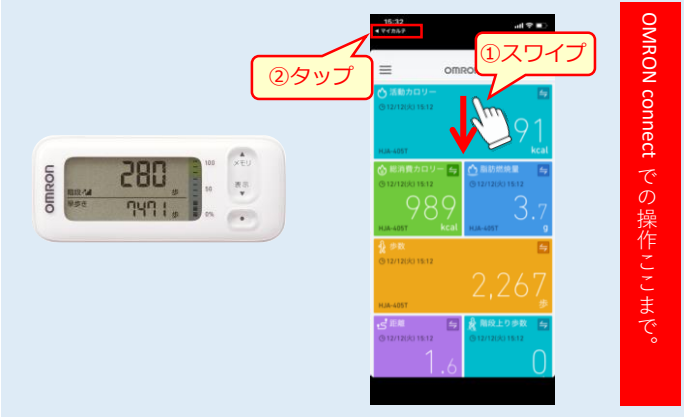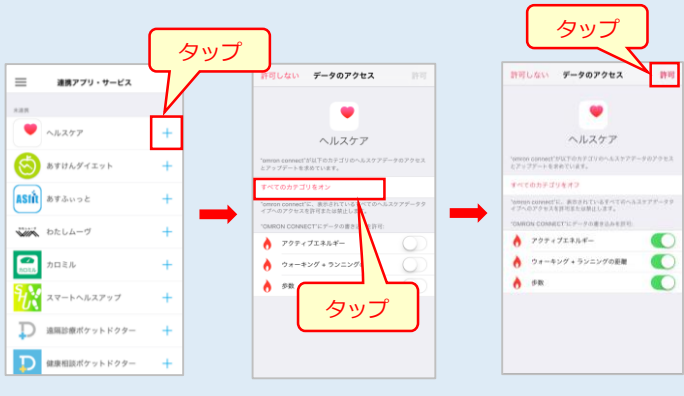

**9** 測定結果が表示されますので、[OK] をタップします。

💡 入力したデータは、一覧やグラフで、かんたんに振り返ることができます。



**⚠️ ご注意ください**

- 『Welbyマイカルテ』 → [オムロンコネクット] → [HJA-405T (活動量計)] に「接続済み」が出ている間は『Appleヘルスケア』のデータは取り込まれません。
- 連携操作をすると、活動量計のデータと『Welbyマイカルテ』に取り込まれているデータの差分が取り込まれます。
- 過去30日分遡って記録が取り込まれ、『Appleヘルスケア』のデータが記録されている場合は、『オムロンコネクット』のデータに上書きされます。
- 差分データがない状態でデータ連携しようとするとう「連携エラー 表示が見つかりませんでした」とメッセージが表示されますので、[OK] をタップしてください。

**【2回目以降】** アプリを起動して下記の手順で測定します。

手順 **2** ⇒ **3** ⇒ **8** ⇒ **9**

※ Bluetooth設定を [オン] にしてから行ってください。

【お問い合わせ】  
Welby (ウェルビー) カスタマーサポート  
電話 : 0120-095-655  
メール : support@welby.jp