

【グルテストアクア】をはじめてご利用の方

グルテストアクアでの操作手順

- 1 グルテストアクアの電源を長押しして設定画面を表示します。
[機器設定]-[Bluetooth設定]-[デバイス登録]の順に開きます。



グルテストアクアでの操作手順

- 2 リストの中から[未登録]となっている項目を選択し、
[GT-7510のパスワード]が空欄の画面を表示します。



- 3 [Welbyマイカルテ]のタブバーにある
[機器連携]をタップします。



【グルテストアクア】をはじめてご利用の方

4

リストから[三和化学研究所血糖測定器 グルテストアクア]をタップします。



5

[ペアリング] 画面が表示されたら、[ペアリングを開始する] をタップします。



【グルテストアクア】をはじめてご利用の方

6

[GT-7510(シリアルNo)をペアに設定
しますか?]の画面が表示されたら、
[ペア設定する]をタップします。



7

2 で表示した画面に血糖測定器のパス
ワードが表示されますので、表示された
パスワードを入力し [OK] をタップします。



8

「計測を開始してください」
の表示が出たらペアリング完了です。

血糖測定器には [デバイス
を登録しました] と表示さ
れます。



【グルテストアクア】を
はじめteご利用の場合の設定は以上で終了です。

【グルテストアクア】のご利用にあたって ご留意いただきたいこと

- 連携操作をすると、血糖測定器本体に保存されているデータが全て取り込まれます（最大1100件）。『Welbyマイカルテ』に過去のデータが記録されている場合は上書きされます。計測データが複数ある場合は取得した期間と件数を表示します。データ取得後に表示されるまで時間がかかることがあります。

機器連携済みの方

1

[Welbyマイカルテ] のタブバーにある
[機器連携] をタップします。

タップ



2

リストから[三和化学研究所血糖測定器 グル
テストアクア]をタップします。

タップ



3

[計測開始] 画面が表示されますので、血糖測定を行ってください。

※このときスマートフォンの画面は、[計測開始] 画面が表示されている状態であることを確認してください。



4

血糖測定が終了したらセンサーを抜き取ってください。[計測結果を受信中...]画面が表示され、測定結果が反映されます。[計測結果]画面の [登録する] をタップします。

※血糖測定器は自動で電源がOFFになります。



計測データが複数ある場合

計測データが複数ある場合は取得した期間と件数を表示します。

データ取得後に表示されるまで時間がかかります。



ご不明な点がございましたら、
Welbyカスタマーサポートまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】

Welby (ウェルビー) カスタマーサポート

電話 : 0120-095-655 (受付時間 平日10:00~17:30)

メール : support@welby.jp

※掲載しているアプリ画面はバージョン2.5.2です。