



# 【血糖測定器】かんたん連携

三和化学研究所血糖測定器で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

株式会社三和化学研究所

welby マイカルテ

iPhone版

Android版

(対応機種：グルテストNeoアルファ)

## ◎ ◎ 測定を行う前に ◎ ◎

Bluetooth通信を利用して測定値を取得します。

はじめに、次の4つの設定状況を確認してから測定を行ってください。

※設定されていないと測定結果を正しく取得できません。

### ■ 「グルテストNeoアルファ」

- ・モードは [多機能] になっていますか  
参考：取扱説明書 24ページ [簡単・選択・多機能モードの設定]
- ・測定時間帯を設定されていますか  
参考：取扱説明書 100ページ [測定時間帯を設定する]
- ・Bluetooth通信は [ON] になっていますか  
参考：取扱説明書 116ページ [Bluetooth通信の設定をする]

### ■ 「スマートフォン」

- ・Bluetoothの設定はオンになっていますか  
お使いの機種によって操作方法が異なります。ご利用の「スマートフォン」の取扱説明書をご覧ください。





## Step.1 血糖測定器とスマートフォンを連携させましょう

- 血糖測定器の操作は   の番号です。
- スマートフォンの操作、および測定器との操作は   の番号です。

**1** 血糖測定器の電源をオンにします。

**2** メニューを表示し、[機器設定] - [Bluetooth設定] - [デバイスリスト] の順に開きます。

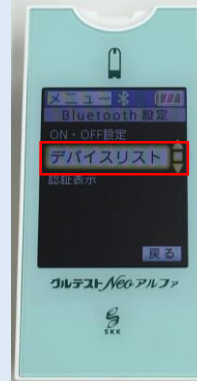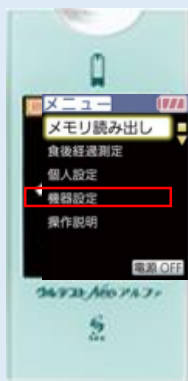

**3** リストの中から [未登録] となっている項目を選択します。

**4** [このメーターのパスワード] が表示されます。



次に、スマートフォンで「Welbyマイカルテ」を操作します。

裏面へ進む → →

5 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、機器連携リストから [三和化学研究所血糖測定器 グルテストNeoアルファ] をタップします。

【iPhone】




【Android】



6 [計測機器とペアリング] 画面が表示されたら、測定器に表示されている [このメータのパスワード] を入力し、[ペアリングを開始] をタップします。

7 [Bluetoothペアリングの要求] 画面が表示されたら、[ペアリング] をタップします。

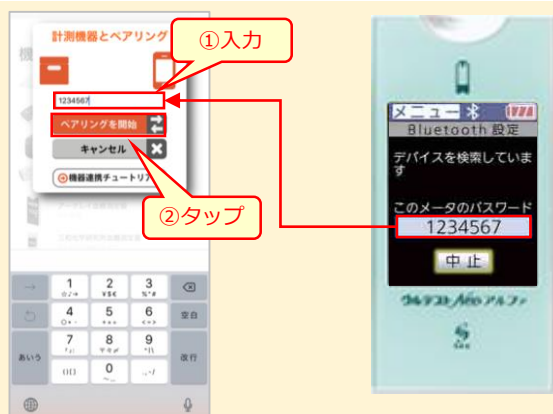


8 [ペアリングが完了しました] と表示されたら、[OK] をタップします。

【iPhone】

血糖測定器には [iPhoneが検出されました] と表示されます。

【Android】 ※「SONY Xperia」での操作例です

血糖測定器には [Xperia Z3 Compacが検出されました] と表示されます。

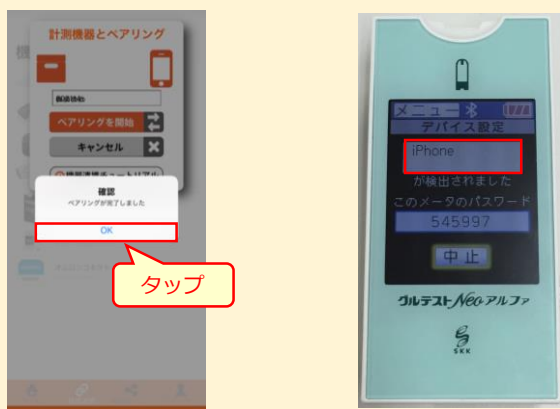

以上で登録は完了です。

# Step.2 測定結果をアプリに取得しましょう

1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、機器連携リストから [三和化学研究所血糖測定器 グルテストNeoアルファ] をタップします。

[iPhone]




[Android]



2 [計測を開始してください] 画面が表示されますので、血糖測定を行ってください。  
※このときスマートフォンの画面は、[計測を開始してください] 画面が表示されている状態であることを確認してください。

3 血糖測定が終了したらセンサーを抜き取ってください。スマートフォンに測定結果が反映されます。スマートフォン画面の [OK] をタップします。  
※血糖測定器は自動で電源がOFFになります。

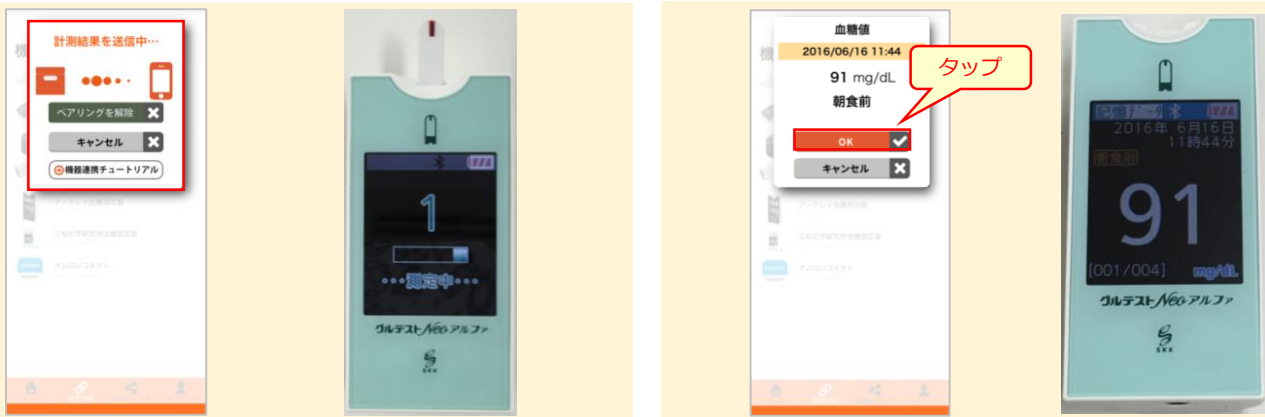

## 💡 アプリで記録を確認しましょう

アプリのホーム画面で、[血糖値] をタップ、連携したデータが確認できます。



また、入力したデータは、一覧やグラフでかんたんに振り返ることができます。



### ⚠️ 取り込まれるデータについて

- 連携操作をすると、血糖測定器本体に保存されているデータが全て取り込まれます。（『Welbyマイカルテ』に過去のデータが記録されている場合は上書きされます。）
- 新たに取り込むデータがない状態でデータ連携しようとするすると「計測データを取得できませんでした」とメッセージが表示されますので、[OK] をタップしてください。

※掲載しているアプリ画面はiOS版（バージョン1.2）です。

【お問い合わせ】  
Welby（ウェルビー）カスタマーサポート  
電話：0120-095-655  
メール：support@welby.jp