



# 【血圧計】かんたん連携

テルモ血圧計で測定した結果を、NFC通信機能（Felica<sup>®</sup>等）搭載のスマートフォンでかんたんに取得することができます。

(対応機種：ES-P2020DK)

**⚠️ ご注意ください** 結果は測定時のみ記録されます。（過去の測定値は取得できません。）

## Step.1 測定結果をアプリに取得しましょう

- 1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、リストから [テルモ血圧計] をタップします。
- 2 [計測を行ってください。] と表示されますので、血圧測定を行います。



- 3 測定が終了したら、血圧計にスマートフォンをかざして、データを取得します。
- 4 [機器連携データ] が表示されたら、[OK] をタップします。以上で登録は完了です。




登録したデータは、測定時間によって [朝1]、[朝2]、[夜1]、[夜2] に自動で表示されます。  
(※朝：0時～11時59分、夜：12時～23時59分)

## Step.2 アプリで記録を確認しましょう

- 1 アプリのホーム画面で、[血圧] をタップします。
- 2 連携したデータが確認できます。

**💡** 入力したデータは、グラフやサマリーで、かんたんに振り返ることができます。

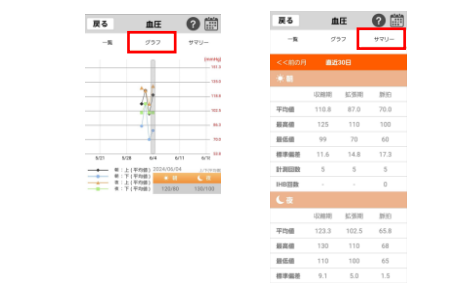

【お問い合わせ】  
Welby (ウェルビー) カスタマーサポート  
電話 : 0120-095-655  
メール : support@welby.jp