



【血圧計】かんたん連携

テルモ血圧計で測定した結果を、NFC通信機能（Felica®等）搭載のスマートフォンでかんたんに取得することができます。

(対応機種：ES-W700DZ)

⚠️ ご注意ください 結果は測定時のみ記録されます。（過去の測定値は取得できません。）

Step.1 測定結果をアプリに取得しましょう

- [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップし、リストから [テルモ血圧計] をタップします。
- [計測を行ってください。] と表示されますので、血圧測定を行います。



- 測定が終了したら、血圧計にスマートフォンをかざして、データを取得します。
- [機器連携データ] が表示されたら、[OK] をタップします。以上で登録は完了です。



登録したデータは、測定時間によって [朝1]、[朝2]、[夜1]、[夜2] に自動で表示されます。
(※朝：0時～11時59分、夜：12時～23時59分)

Step.2 アプリで記録を確認しましょう

- アプリのホーム画面で、[血圧] をタップします。
- 連携したデータが確認できます。



💡 入力したデータは、一覧やグラフで、かんたんに振り返ることができます。



【お問い合わせ】
 Welby (ウェルビー) カスタマーサポート
 電話 : 0120-095-655
 メール : support@welby.jp