



【活動量計（メディウォーク）】かんたん連携

テルモ活動量計で測定した結果を、NFC通信機能（Felica[®]等）搭載のスマートフォンでかんたんに取得することができます。

（対応機種：メディウォーク MT-KT02DZ）

Step.1 測定結果をアプリに取得しましょう

- 1 [Welbyマイカルテ]の タブバーにある [機器連携] をタップします。
- 2 リストから [テルモ活動量計] をタップします。
- 3 [計測を行ってください。] と表示されます。



- 4 アプリの画面表示はそのままで、活動量計にスマートフォンをかざし、データを取得します。

- 5 [機器連携データ] が表示されたら [OK] をタップします。以上で登録は完了です。



POINT 連動されるデータと記録日の関係性について

測定情報は23時59分までを1日分として取得します。

例えば、前日の20時に一度機器連携を行いデータを取得します。次に、その翌日の6時に連携を行った場合、最初に前日の23時59分までの [機器連携データ] が表示されますので、[OK] をタップして取得してください。その後、当日の6時の [機器連携データ] が表示されますので、[OK] をタップして取得してください。

活動量計の裏面をスマートフォンにかざします



Step.2 アプリで記録を確認しましょう

- 1 アプリのホーム画面で、[運動] をタップします。
- 2 連携したデータが確認できます。



入力したデータは、一覧やグラフで、かんたんに振り返ることができます。



【お問い合わせ】
Welby (ウェルビー) カスタマーサポート
電話 : 0120-095-655
メール : support@welly.jp