


各種機器で提供されているデータ管理アプリと連携することで、血圧、血糖値、体重、運動などの測定機器のデータを簡単に「Welbyマイカルテ」アプリに記録することができます。

本書では、「OMRON connect」アプリとの連携についてご説明いたします。

⚠️ 予め、機器とOMRON connectアプリの連携設定が必要です！

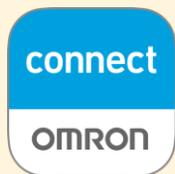

こちらの手順書でご説明するのは、**OMRON connectアプリとマイカルテの連携手順**です。

▼連携をする前に確認していただきたいこと

■ OMRON connectアプリは「インストール済み」ですか？

血圧計、血糖測定器、体組成計、活動量計等の測定機器から測定結果を連携するためにOMRON connectアプリが必要です。

■ OMRON connectアプリで「会員登録」はお済みですか？

OMRON connectアプリをご利用いただくためには、会員登録が必要です。
 (※以前より連携アプリのアカウントをお持ちの場合は、改めての登録は不要です。)

OMRON connectアプリのログインIDとパスワードを控えておいてください。
 (※後の手順で必要となります)

設定方法がご不明な場合は、OMRON connectアプリのご利用案内をご覧くださいか、OMRON connectの提供元へお問合せ下さい。

■ 測定機器からOMRON connectアプリへ「データの転送」はできていますか？

OMRON connectアプリと測定機器を連携し、血圧、体重、活動量計等の測定結果がOMRON connectアプリに反映されていることをご確認ください。
 測定機器からOMRON connectアプリへのデータ転送がうまくいかない場合は、OMRON connectの提供元へお問合せ下さい。

▼測定機器のご利用にあたってご留意いただきたいこと

■ ペアリングを行った際や測定機器の電池を交換した際は、一度必ず測定結果を登録してください。

ペアリング設定後または電池交換後に1回分の測定結果を登録することで、測定値の日時が記録されます。
 以後の測定結果を正しく取り込むために一度測定結果を登録してください。


■ 専用ACアダプタでご使用の場合も必ず電池を入れた状態でご利用ください。

各測定機器は電源がない状態では内蔵の時計がリセットされます。ACアダプタのコンセントを抜いたときに、蓄積した測定データが取り込めなくなってしまいます。

Androidのスマートフォンをお使いの方は、本ページをスキップして、
「▼OMRON connect ➡ マイカルテの連携を設定する」にお進みください。

※iPhoneをお使いの方のみ実施してください

▼OMRON connectアプリから「ヘルスケア」への書き込みを「OFF」にする

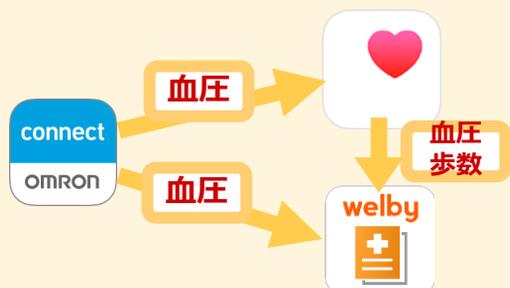

OMRON connectアプリからiPhoneの「ヘルスケア」アプリに書き込みを許可している場合、「ヘルスケア」アプリからWelbyマイカルテに血压や体重のデータが取り込まれ、データが重複する可能性があります。



「ヘルスケア」アプリと連携している場合、以下の手順でOMRON connectアプリから「ヘルスケア」アプリへの書き込みをOFFにしてください。

※図は、OMRON connectアプリから血压を、「ヘルスケア」アプリから歩数を連携したい場合の例です

1. 「OMRON connect」アプリを起動してください。

画面下部の「コンテンツ」>「コンテンツ追加」>ヘルスケア連携の「連携設定」の順にタップして、「ヘルスケアヘータを書き込み」をOFF（ボタンが白の状態）にしてください。



▼OMRON connect ⇒ マイカルテの連携を設定する

1. 「Welbyマイカルテ」アプリ右上の人マーク  をクリックしてマイページを表示し、「機器連携設定」をタップしてください。連携可能なサービスの一覧が表示されます。「OMRON connect」をタップしてください。「OMRON connectと連携する」のボタンをタップしてください。



2. 利用規約が表示されます。内容を読んで同意してください。

3. 連携サービスのログイン画面が表示されます。**WelbyマイカルテのID・パスワードではなく、OMRON connectのID・パスワード**を入力して、サインインをタップしてください。



※連携が完了すると、連携した日より、データの取り込みが開始されます。過去のデータは取り込まれません。

※ログインができない場合は、OMRON connectアプリでご確認いただくか、OMRON connectの提供元へお問合せ下さい。

アプリの操作方法などのお問い合わせはこちら

Welby (ウェルビー)
カスタマーサポート

電話 : 0120-095-655
(平日10:00~17:30)

メール : support@welby.jp

※OMRON connect から歩数を連携している場合、以下手順を実施してください。
オムロンの活動量計（歩数計）を使用していない場合、こちらの操作は不要です。

▼OMRON connect から連携した歩数を表示する

ホーム画面下部の「記録確認」>「運動」を開いた際、デフォルトでは「手動入力」の歩数のみが表示される状態となっています。

以下の手順で、「OMRON connect」から連携した歩数が表示されるよう、設定してください。

1. ホーム画面の「記録確認」をタップしてください。
2. フィルタ（デフォルトでは「手動」と表示されています）をタップし、「OMRON connect」>「決定」の順にタップしてください。
3. OMRON connectから連携した歩数が表示されます。

