


各種機器で提供されているデータ管理アプリと連携することで、血圧、血糖値、体重、運動などの測定機器のデータを簡単に「Welbyマイカルテ」アプリに記録することができます。

本書では、以下アプリとの連携についてご説明いたします。

Fitbit、A&D Connect Smart、スマートe-SMBG、Health Planet、FreeStyleリブレLink

**！ 予め、機器と各アプリの
連携設定が必要です！**

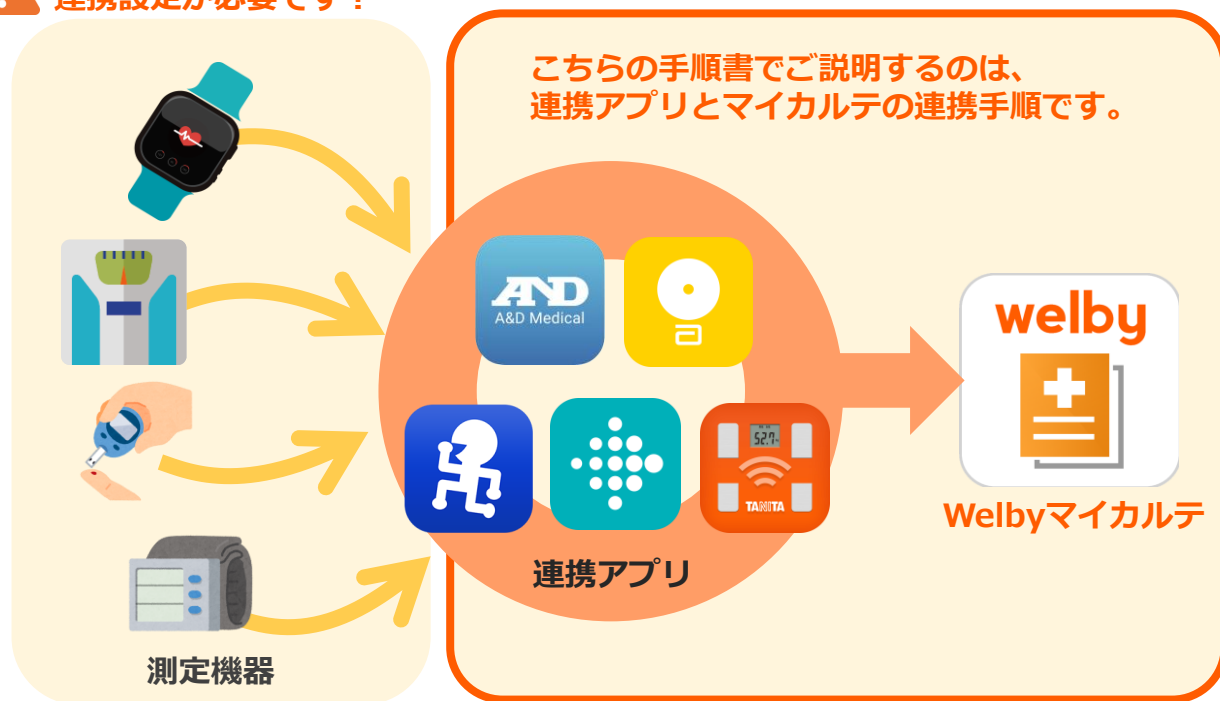

▼連携をする前に確認していただきたいこと

■連携アプリは「インストール済み」ですか？

血圧計、血糖測定器、体組成計、活動量計 等の測定機器から測定結果を連携するために各機器に対応したアプリが必要です。

■連携アプリで「会員登録」はお済みですか？

連携アプリをご利用いただくためには、会員登録が必要です。

(※以前より連携アプリのアカウントをお持ちの場合は、改めての登録は不要です。)

連携アプリのログインIDとパスワードを控えておいてください。

(※後の手順で必要となります)

設定方法は、各アプリによって異なります。ご不明な場合は、各アプリのご利用案内をご覧ください。アプリの提供元へお問合せ下さい。

■測定機器から連携アプリへ「データの転送」はできていますか？

連携アプリと測定機器を連携し、血圧、血糖値、体重等の測定結果が連携アプリに表示されていることをご確認ください。

測定機器から連携アプリへのデータ転送がうまくいかない場合は、各アプリのご利用案内をご覧ください。アプリの提供元へお問合せ下さい。



▼連携アプリ → マイカルテの連携を設定する

1. 「Welbyマイカルテ」アプリ右上の人マーク  をタップしてマイページを表示し、「機器連携設定」をタップしてください。連携可能なアプリの一覧が表示されます。連携設定をするアプリ名をタップしてください。「○○○○と連携する」のボタンをタップしてください。



2. 一部、利用規約が表示されるアプリがあります。利用規約が表示されたら、内容を読んで同意してください。
3. 連携アプリのログイン画面が表示されます。**WelbyマイカルテのID・パスワードではなく、連携アプリのID・パスワードを**入力して、ログインをタップしてください。

一部、連携する項目を選択可能なアプリがあります。連携項目の一覧が表示されたら、連携する項目にチェックを入れて、次の画面に進んでください。

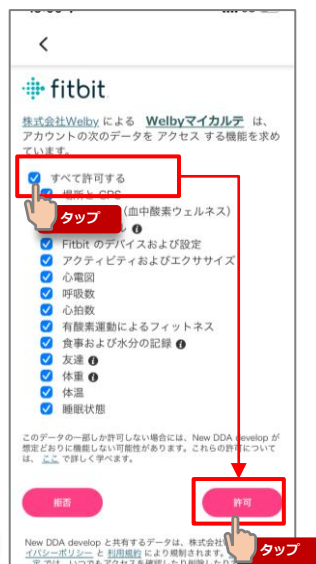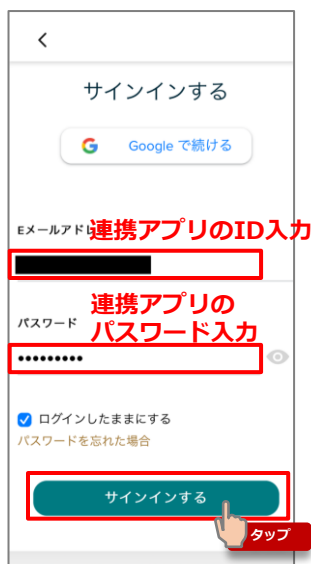

「連携が完了しました」と表示されれば完了です！

A&D Connect Smart、スマートe-SMBG、Health Planet、FreeStyleリブレLinkは、連携した日より、データの取り込みが開始されます。過去のデータは取り込まれません。

Fitbitは、連携した日の前日分も含めて、データが取り込まれます。

アプリの操作方法などのお問い合わせはこちら

Welby（ウェルビー）
カスタマーサポート

電話 : 0120-095-655
(平日10:00~17:30)
メール : support@welby.jp

※「ログイン」ではなく、「サインイン」と表示されている場合がありますが、意味は同じです。

※ログインができない場合は、連携アプリのアカウント情報をご確認いただくかアプリ提供元へお問合せ下さい。

※連携アプリから歩数を連携している場合、以下手順を実施してください。
活動量計（歩数計）を使用していない場合、こちらの操作は不要です。

▼連携アプリから連携した歩数を表示する

ホーム画面下部の「記録確認」>「運動」を開いた際、デフォルトでは「手動入力」の歩数のみが表示される状態となっています。

以下の手順で、連携アプリから連携した歩数が表示されるよう、設定してください。

1. ホーム画面の「記録確認」をタップしてください。
2. フィルタ（デフォルトでは「手動」と表示されています）をタップしてください。
歩数を連携しているアプリを選択し、「決定」をタップしてください。
3. 連携アプリから連携した歩数が表示されます。



※画面は、Fitbit から連携した歩数を表示させたい場合の例です。